



NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD
OPIEKI
ZDROWOTNEJ
SZPITAL
W PUSZCZYKOWIE Sp. z o.o.

INSTRUKCJA
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
QI-009/HS

Strona : 1 z 3

WYDANIE 1

ISO 9001: 2000

*Instrukcja oczyszczania
narzędzi i sprzętu medycznego*

DATA OBOWIĄZYWANIA:

2005-10-03


Kopia nr:

Własność:

--	--

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być zmieniana bez wiedzy ani kopiowana bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

	<i>STANOWISKO</i>	<i>DATA</i>	<i>NAZWISKO</i>	<i>PODPIS</i>
<i>OPRACOWAŁ</i>	Pielęgniarka Epidemiologiczna	2005.10.03	Anna Danielak	<i>Danielak</i>
<i>SPRAWDZIŁ</i>	Naczelny Pielęgniarz	2005.10.03	Wacław Dyk	<i>Dyk</i>
<i>ZATWIERDZIŁ</i>	V-ce Prezes Zarządu	2005.10.03	Stanisław Trąpczyński	<i>Stanisław Trąpczyński</i>

 <p>NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE Sp. z o.o.</p>	INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QI-009/HS	Strona : 2 z 3
ISO 9001: 2000	<i>Instrukcja oczyszczania narzędzi i sprzętu medycznego</i>	DATA OBOWIĄZYWANIA: 2005-10-03

1. Przebieg czynności

ŚRODKI MATERIALNE	PRZEBIEG CZYNNOŚCI	UWAGI
Strzykawka Pistoletu wodny Szczoteczka do oczyszczania kanałów	<p>Czynności przed wykonaniem pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Założyć odzież ochronną – rękawiczki oraz fartuch i okulary ochronne jeśli istnieje możliwość rozprysku. <p>Czynności w trakcie wykonania pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjąć sito z narzędziami, sprzętem medycznym (Jeśli były dezynfekowane w wannie z sitem) 2. Oczyszczyć narzędzia, sprzęt medyczny pod bieżącą wodą przy użyciu szczotki) 3. Oczyszczyć kanały i inne wolne przestrzenie wewnętrzne narzędzi, sprzętu medycznego przy użyciu strzykawki, pistoletu wodnego lub specjalnej szczoteczki. 4. Narzędzia, sprzęt medyczny dokładnie opłukać, pamiętając o przepłukaniu kanałów i innych wolnych przestrzeni za pomocą strzykawki lub pistoletu wodnego. <p>Czynności po zakończeniu pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narzędzia/sprzęt medyczny osuszyć, poddać procesowi dezynfekcji właściwej lub przygotować do sterylizacji lub przechowania 2. Szczotkę/strzykawkę używane do oczyszczania narzędzi/sprzętu medycznego zdezynfekować, osuszyć, a następnie przechowywać w higienicznych warunkach. 3. Jeśli proces oczyszczania wykonywany był przed dezynfekcją (w sytuacji gdy, nie można wykonać dezynfekcji wstępnej) zlew i jego otoczenie należy zdezynfekować. <p>Postępowanie w sytuacjach awaryjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przypadek zakłucia/zranienia ostrym narzędziem Postępowanie zgodne z „Postępowanie po ekspozycji na krew lub inne potencjalnie infekcyjne materiały” 	<p>W przypadku oczyszczania po dezynfekcji właściwej poprzedzonej dezynfekcją wstępną ominąć etapy 2 i 3 (Czynności w trakcie wykonywania pracy)</p> <p>W przypadku gdy, po wykonywaniu jednego procesu dezynfekcji, mimo użycia preparatu o właściwościach czyszcząco-dezynfekujących, na narzędziach/sprzęcie medycznym pozostaje materiał biologiczny należy, wykonany proces dezynfekcji uznać jako wstępny i po oczyszczeniu wykonać kolejny proces dezynfekcji.</p> <p>W sytuacji gdy, nie można wykonać dezynfekcji wstępnej, oczyszczanie przed dezynfekcją należy przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie doszło do nadmiernego rozprysku i skażenia otoczenia miejsca.</p>

